



1. MPC är lättast att sätta på medan djuret står upp och benet är i en naturlig position.
2. Placera det ej drabbade benet i hålet på MPC.
3. Placera det drabbade benet i MPC:ns byxdel.

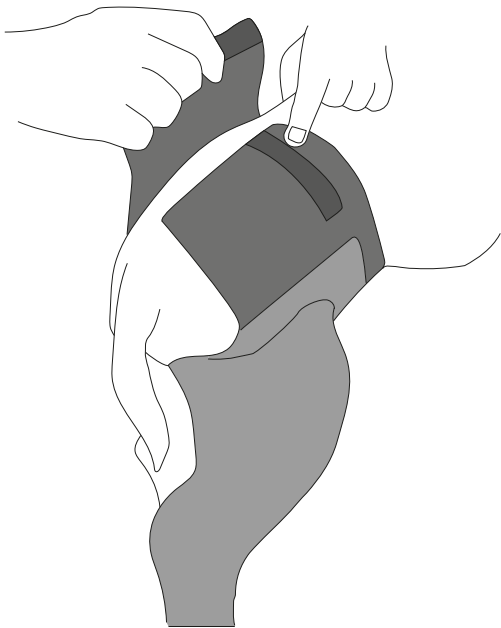


4. Dra åt så att MPC:n formas runt midjan.


Fäst och justera MPC:n med kardborrebandet.

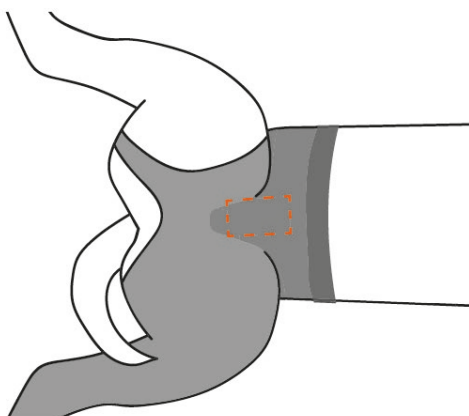


5. För en hanhund måste du klippa ett hål för könsorganet.
6. Det är viktigt att inte skära MPC:n för mycket utan att spara en bit neopren i bukområdet.

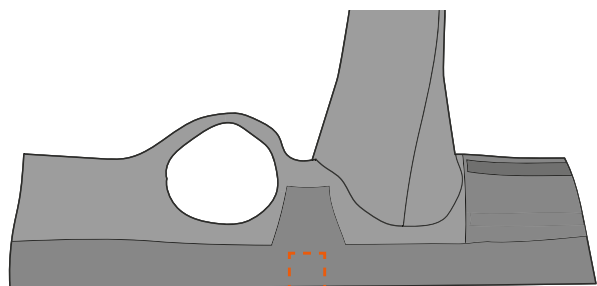


6. Om könsorganet sträcker sig framför MPC:ns längd, använd det medföljande förlängningsstycket. Se 6.1- 6.3.

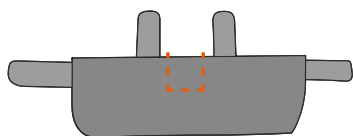

6.1. För att avgöra var och hur mycket av MPC:n som behöver klippas, prova den på hunden och använd en märkpena eller en krita för att märka ut ett lämpligt utskuret område. Använd en sax för att klippa ut de markerade områdena.

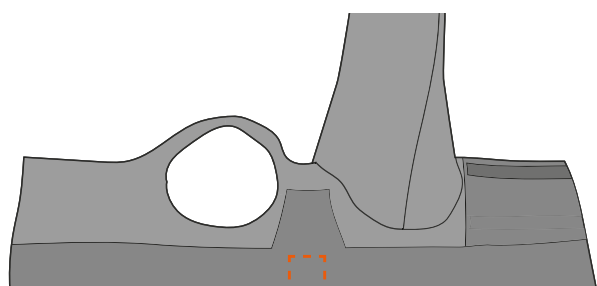


6.2. Placera förlängningsstycket parallellt med MPC:n med kardborrbandet mot MPC:n. Rikta in mitten av förlängningen till den utskurna delen av MPC:n.

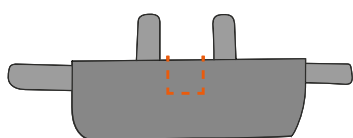

Använd en sax för att klippa ut en bit av förlängningen. Se till att undvika att skära i kardborrbandet på förlängningsstycket.

6.3. Fäst förlängningsstycket på MPC:n.

7. Om MPC:n är för lång, klipp den med en sax. Klipp av längden på armen nedanför den blå sömmen.

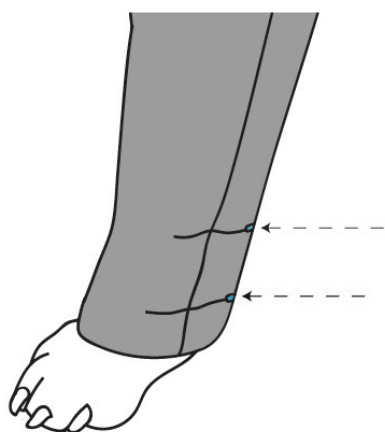

8. Obs! Tassen måste kunna röra sig fritt och MPC:n får inte orsaka tryck eller skavsår på ovansidan av tassen.

Skötselråd

- Ta bort päls och skräp från kardborrbandet för bästa vidhäftning.
- Rengör MPC:n med mildt rengöringsmedel för hand, max 30 °C.

Ångerrätt

- Vi accepterar inte retur av produkter som har använts på en patient på grund av infektionsrisken genom indirekt kontakt. Med indirekt kontakt menas att bakterierna överförs mellan djur till produkter som tidigare använts på andra djur.

Tel. +46 (0)31-21 41 28 Email: info@scandiop.se



Scandiop


Måttagning

Medical Protection Cover bakben

Måttagning

Utför mätningen i centimeter med djuret stående:

1. Mät omkretsen runt midjan precis framför bakbenen.
2. Mät avståndet mellan höftledskulan och tassens ovansida, följandes benets kontur.

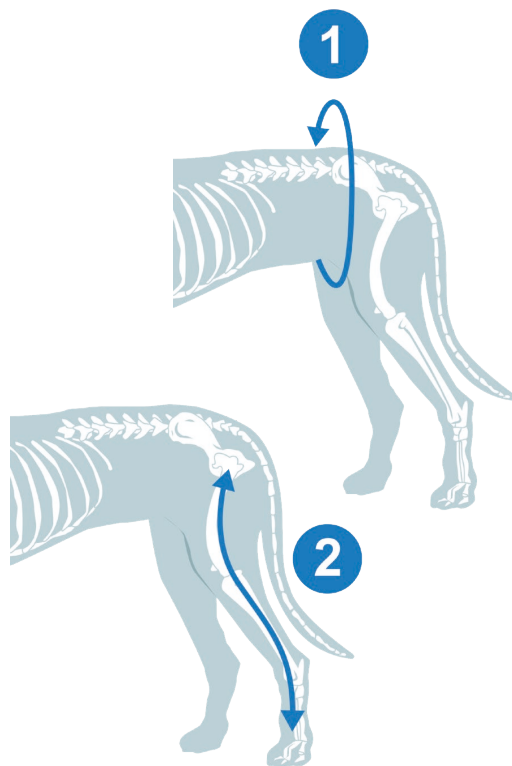

Storleksanpassning

Välj passande storlek enligt nedan

| Storlek | 1. (cm) | 2. (cm) |
|---------------|-----------|-----------------------|
| 4XS | 24 - 34 | 12 - 14.5 |
| 3XS | 30 - 37 | 16 - 18.5 |
| 2XS | 33 - 42 | 15 - 22 |
| XS | 34 - 44 | 23 - 29.5 |
| S | 43 - 55.5 | 30 - 37.5 |
| S Wide | 45 - 60 | 32 - 39 (bredare lår) |
| M | 51 - 64 | 38 - 44.5 |
| L | 54 - 69.5 | 45 - 49.5 |
| XL | 69 - 86 | 50 - 59.5 |



Scandiop